


Provtagningsinstruktion till den nationella biobanken för KLL

Proverna till KLL-biobanken kan bara tas **Måndag, Tisdag** eller **Onsdag**. De skickas med vanlig post (i speciellt frankerat kuvert). De behöver nå KI Biobank dagen efter provtagningen (cellerna dör om det tar längre tid än 24 timmar) och därför måste de skickas samma dag som de tas. Blodproverna ska heller **inte** förvaras kallt.


- Säkerställ att patienten fått patientinformationen. Patienten ska sedan signera på avsedd plats på remissen – vilket betyder informerat samtycke och blanketten sparas sedan centralt.
- Kontrollera identiteten. Fyll i personnummer och provtagningsinformation på remissen: datum och tid för provtagningen och senaste värdet på LPK. OBS: ange värdena med en decimal, t ex LPK 8,0 (för att underlätta tolkningen vid automatisk scanning).
- Prover som ingår: 3 edta rör, 1 serumrör, salivrör samt 1 edtarör för benmärg. Det är viktigt att det är rören som ligger i de färdiga provtagningskuverten som används p.g.a. maskinerna på KI Biobank kräver viss storlek på rören.
- Provrören märks med streckkodsetiketterna som finns på remissen.
Blodproverna tas som vid vanlig venpunktion. Vänd rören försiktigt fem gånger omedelbart efter fyllning och placera rören i transporthylsorna. Om det är svårt att ta alla blodproverna ska Edta rören prioriteras framför serumröret.
- **För benmärgsprovet:** Förbered genom att dra upp 1,5 ml natriumklorid (0.9 %) i en spruta. Läkaren aspirerar 2-3 ml benmärg som sprutas i avsett provrör och därefter tillsätts natriumkloriden. Om man missat att ta biobanksprover när benmärgsprov togs, så tas endast blod och salivprov, m.a.o. inget extra benmärgsprov skall enbart för biobankssyfte.
- **Salivprovet** tas enligt instruktion – finns på nästa sida! OBS: Patienten ska inte ha ätit, druckit, snusat, rökt eller tuggat tuggummi 30 minuter innan provet tas.
- Lägg alla prover, tillsammans med ifylld remiss, i det förfrankerade kuvertet och posta det helst på förmiddagen.
- Meddela KI Biobank att proverna är tagna och på gång genom att skicka ett kort mail till: biobank-lab@ki.se - ange i mailet att det är prov till KLL biobanken. Ta

gärna en kopia på remissen och förvara på enheten, så ni vet lokalt vilka av er patienter som är med i biobanken.


Instruktion för salivprov

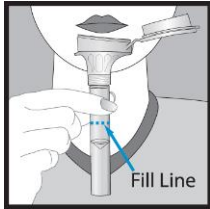


1
Spotta tills
mängden saliv
(räkna inte med
skum) når upp till
strecket som visas
i bild

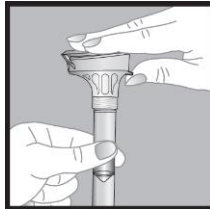


2
Håll röret upprätt
med en hand.
Stäng locket med
andra handen
(enligt bilden)
genom att trycka
till locket
ordentligt tills du
hör ett klickljud.
Vätskan i locket
blandas med
saliven i röret. Se
till att locket är
stängt ordentligt.

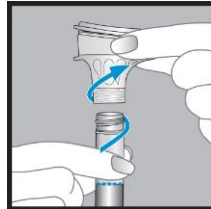

3
Håll röret upprätt.
Skruva av tratten
från röret.

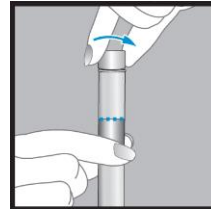

4
Stäng röret genom
att skruva på det
lilla locket
ordentligt.

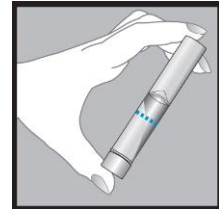

5
Skaka det helt
stängda röret 5
gångar Kasta eller
återvinn tratten.

För de flesta tar det mellan 2 till 5 minuter att lämna ett salivprov genom att följa steg 1 till 5. Innan du spottar bör du slappna av och du kan skapa saliv genom att lätt gnugga dina kinder i 30 sekunder. Om du fortfarande har svårt att producera saliv kan du suga på en nypa (ca ¼ tsk) vanligt socker. OBS! Endast socker, inte godis eller tuggummi

När ni behöver nya provtagningskit - skicka ett mail till:
kerstin.hamberg.levedahl@akademiska.se

Vid frågor om projektet ta kontakt med:

Kerstin Hamberg Levedahl tel: 0738-665952 eller mail:
Kerstin.hamberg.levedahl@akademiska.se

eller

Per-Ola Andersson tel: 0723-878081 eller mail: per-ola.andersson@vgregion.se

